

## ANWENDUNG PROFISIL® FLUORIDE VARNISH

				
<b>1</b>	Die Folie des Einzeldosis-Blisters vorsichtig abziehen. Die Folie in der Nähe der Bürste anheben und die Bürste entnehmen.		<b>Profisil®</b> Fluoride Varnish	Vor der Anwendung ist keine Prophylaxe erforderlich. Wird eine Prophylaxe durchgeführt, sollte der Lack nach dem Scaling und Polieren aufgetragen werden
<b>2</b>	Die übrige Folie abziehen und den Lack freilegen. Den Inhalt kurz zu einer homogenen Masse vermischen.			Die Zähne müssen vor dem Auftragen des Lacks nicht getrocknet werden.
<b>3</b>	Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf alle betroffenen Zahnoberflächen auftragen.			Profisil® Fluoride Varnish kann auf alle betroffenen Zahnoberflächen aufgetragen werden.
<b>4</b>	Direkt nach der Anwendung nicht ausspülen oder absaugen. Empfehlen Sie, mindestens vier Stunden lang nicht die Zähne zu putzen und Zahnseide zu verwenden oder beides möglichst auf den nächsten Tag zu verlegen.			Profisil® Fluoride Varnish bewirkt eine glatte Oberfläche und ein angenehm erfrischendes Mundgefühl!