










## ANWENDUNG VSXE® ONE


1	 <b>Erstellen eines individuellen Löffels</b>		 Bei einer offenen Löffeltechnik auf die Durchlässe für die Halteschrauben der Abdruckpfosten achten. Die Durchlässe kaminartig verstärken.
2	 <b>Abdruckpfosten auf den Implantaten befestigen</b>		Bei der Verwendung eines offenen Löffels sollten die Halteschrauben weit genug durch die Perforationen hindurch reichen, um eine gute Zugänglichkeit der Schrauben nach der Abformung zu gewährleisten.
3	<b>Vorbereiten des individuellen Löffels</b> Haftlack 5 Min. vor Abformnahme auftragen (Herstellerangabe beachten!).		Universal Adhesive <b>Cave:</b> Ausschließlich für den Abformwerkstoff empfohlenen Haftlack verwenden.
4	<b>Beurteilung der Mundsituation</b> Bei Restzahnbestand Ausblocken stark unter sich gehender Bereiche.		Wachs oder andere Ausblockmaterialien
5	<b>Applikationsspritze befüllen</b> Befüllte Applikationsspritze an den Behandler weitergeben und direkt mit Schritt 6 fortfahren.		Applyfix 5 Beim Befüllen Luft einschließen vermeiden. Bei der Verwendung einer Applikationsspritze darauf achten, dass keine fremden Abformmaterialreste in der Spritze zurückgeblieben sind. Nach dem Umspritzen muss der befüllte Abformlöffel direkt eingesetzt werden. Die Mundtemperatur beschleunigt die Abbindung des Materials.
6	<b>Abformmaterial anmischen</b> VSXE® One homogen anmischen und individuellen Löffel befüllen. Zur Vermeidung von Blasen die Mischerspitze im Material belassen.		VSXE® One, Sympress Dispenser Bei der Erstverwendung der Kartusche ist auf eine homogene Mischung zu achten. Mindestens die ersten 3 cm sollten einmalig verworfen werden.



1

## Umspritzen der Abdruckpfosten

Die Pfosten müssen komplett vom Material umflossen sein.

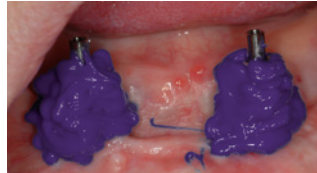


VSXE® One



2

## Einbringen in den Patientenmund und Entnahme

Befüllten Abformlöffel in den Patientenmund einbringen und bis zum Abbinden in Position halten. Bei offener Abformtechnik vor der Entnahme die Halteschrauben der Transferpfosten lösen. Die Abformung säubern und trocknen.

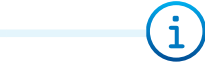

Gesamtverarbeitungszeit beachten! Zur Vermeidung von Blasen die Applikationsspitze im Material belassen.

**Cave:** Keine Übergabe des Abformlöffels! Abbindezeit des Materials beachten! Den Löffel nicht bis zum Löffelboden durchdrücken.

3

## Kontrolle und ggf. Reposition der Abdruckpfosten

Den richtigen Sitz der Transferpfosten prüfen.



4

## Abformung desinfizieren

Angaben des Herstellers beachten.



Empfohlen wird eine Tauchdesinfektion, bei der die Oberfläche komplett benetzt ist. Eine Einwirkzeit von 10 Min. muss berücksichtigt werden.

