

UNTERFÜTTERUNG



MUCOPREN® SOFT – HÄLT, WAS ES VERSPRICHT

Prothesenunterfütterung

Mucopren[®] Soft ist ein dauerhaft weichbleibendes Langzeit-Unterfütterungsmaterial auf A-Silikon Basis für die direkte und indirekte Anwendung.



- O Für die Erstellung von dauerhaft weichbleibenden Unterfütterungen
- O Zum Ausgleich von Schleimhautbezirken mit unterschiedlicher Resilienz
- Zur Entlastung von scharfen Knochenkanten
- Zur Entlastung des Operationsgebietes nach Inseration von Implantaten
- O Für die Unterfütterung von Interimsprothesen
- O Als Schleimhaut-Conditioner bei einer Prothesenstomatitis
- O Zur Erstellung und Unterfütterung von Obturatoren

Technische Daten

	1:1								
Produktname	Misch- verhältnis	Verarbei- tungszeit bei 23 °C ≤	Verarbei- tungszeit bei 35°C ≤	Mundver- weildauer bei 35°C ≥	Abbinde- ende ≥	Shore- Härte (ca.)	Lineare Maß- änderung (max.) %	Elastische Rückstell- ung nach Verformung (ca.) %	Verformung unter Druck (ca.) %
Mucopren® Soft direkte Unterfütterung	1:1	2:15 Min.	-	3:15 Min.	5:30 M in.*	A 28	- 0,20	99,5	9,4
Mucopren® Soft indirekte Unterfütterung	1:1	2:15 Min.	-	-	> 30 Min. im Druck- topf	A 28	- 0,20	99,5	9,4



HEMMT BAKTERIENANSIEDLUNG



O Durch eine glatte, hydrophobe Silikonoberfläche*

EINFACHE BEARBEITUNG



O Aufgrund einer guten Fräsbarkeit

HOHER TRAGEKOMFORT

O Dank dauerhaft elastischer Eigenschaften

GARANTIERTE LANGZEITHAFTUNG AN DER PROTHESE

Dank hervorragender
Haftvermittlung durch
das Mucopren® Adhäsiv



MUCOPREN® SOFT-DAS SORTIMENT

Mucopren® Soft

Basis-Set

50 ml Unterfütterungssilikon, 50 ml Versiegelungssilikon, 10 ml Adhäsiv, 1 Stahlfräser, umfangreiches Zubehör

Unterfütterungssilikon

2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen

Mucopren® Versiegelungssilikon

50-ml-Kartusche, 10 Mischkanülen

Mucopren® Adhäsiv

10-ml-Flasche





