

Eindeutige Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung

Abformmaterial Identium® überzeugt Zahnärzte und Labore auf breiter Basis

In einer breit angelegten Anwendungsbeobachtung mit 318 Patientenfällen hat Kettenbach Dental das Präzisionsabformmaterial Identium® für die einzeitige Abformtechnik auf Herz und Nieren testen lassen. Das Fazit der Zahnärzte sowie der zahntechnischen Labore ist dabei eindeutig positiv ausgefallen: insbesondere bei den hoch relevanten Kriterien wie Fließfähigkeit, Mundverweildauer, Verarbeitungszeit und Detailgenauigkeit wusste Identium® zu überzeugen.

Identium® ist als Vinylsiloxanether® (VSXE®) einzigartig. Für die einzeitige Abformtechnik entwickelt, vereint es die Vorteile von A-Silikon und Polyether. Den Erfolg des Konzepts zeigen die Ergebnisse der Feldstudie: die Teilnehmer waren durchweg überzeugt von den Produktvorteilen von Identium®.

Die Feldstudie

105 Zahnärzte nahmen an einer Anwendungsbeobachtung von Kettenbach Dental teil. Sie setzten Identium® in den Viskositäten Medium, Heavy und Light im Rahmen ihrer täglichen Abformnahme ein und dokumentierten ihre Ergebnisse en detail. In 58 % der Patientenfälle wurde mit der Monophasentechnik abgeformt; 42 % wandten die Doppelmischtechnik an. Über die Hälfte der Teilnehmer hat in der Vergangenheit hierfür mit Polyether gearbeitet. Knapp 50 % der Indikationen bezogen sich auf Kronen/Brücken-Versorgungen, der Rest auf Fixation, Funktion und Unterfütterung.

Die Bewertung

Die sehr wichtigen Kriterien „Präzision der Abformung“ und „Passgenauigkeit der fertigen Restauration“ wurden in 86 % bzw. in 83 % der Fälle mit sehr gut/gut bewertet. Die Basis dafür bilden Detailbewertungen: die Fließfähigkeit des Materials wurde mit 89 %, die Hydrophilie mit 86% sehr gut/gut bewertet; das Material fließt also im feuchten Milieu sehr gut an den Zahn an und generiert damit eine hohe Präzision. Das haben auch die Labore bestätigt: In knapp 80 % der Patientenfälle waren diese sehr zu-

frieden und zufrieden mit dem Abformmaterial Identium®. Eine gute Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Einfach präzise und gut

Darüber hinaus überzeugte Identium® die teilnehmenden Zahnärzte auch im Bereich der komfortablen Anwendung: sei es die einfache Mundentnahme, das Materialhandling oder der Patientenkomfort – in über 80 % der Fälle wurde Identium® in diesen Kriterien mit sehr gut/gut bewertet.

Da überrascht es nicht, dass 73 % der Feldstudienteilnehmer Identium® nun für ihre Abformung einsetzen wollen.

Alle Ergebnisse der Anwendungsbeobachtung, zusammengefasst in einer handlichen Broschüre, können gerne unter 02774 705-99 abgefordert werden. Weitere Informationen zu Identium® finden Sie unter www.kettenbach-dental.de

Zeichenzahl: 2.700

Weitere Informationen:
Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg

Ansprechpartner:
Dr. Markus Knetsch
Communication Manager
-Marketing-
Tel.: +49 (2774) 705-60
E-Mail: markus.knetsch@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de

FAZIT

73 % möchten **Identium®**
weiterverwenden

